



reducecept

Mobiele handleiding

Version: June 15th 2020

Reducept mobiele app


De Reducept mobiele app stelt je in staat om Reducept te spelen zonder Oculus Go headset. In deze handleiding installeer je Reducept op je smartphone en koppel je jouw game aan het abonnement dat je van je behandelaar hebt gekregen.

Content


Reducept installeren op je telefoon	3
Inloggen in de Reducept app	6
De Reducept game in VR spelen	8

Reducept installeren op je telefoon

1. Open de iTunes Store (op iPhone) of de Google Play store (op Android telefoons).

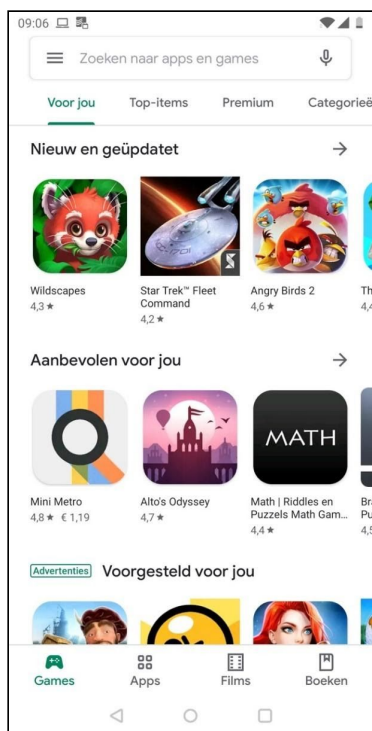


2. Zoek in het zoekveld op 'reducept'. Kies de Reducept app in de zoekresultaten.

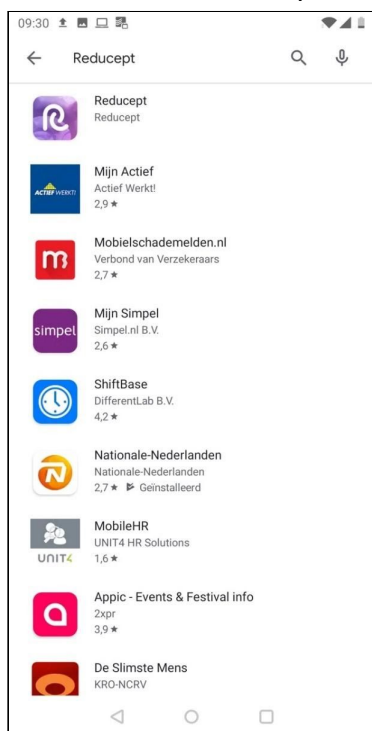

S

3. Druk op 'Installeren'.

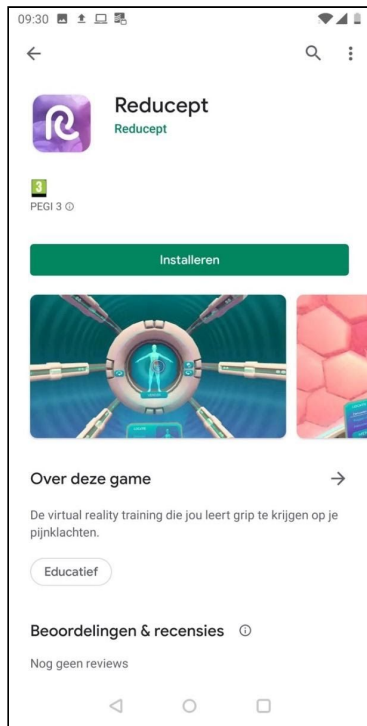


4. Druk op 'Openen'. De Reducept app is ook toegevoegd aan het startscherm van je telefoon.



Inloggen in de Reducept app


1. Start de Reducept app (zie de stap 'Reducept installeren op je telefoon').
2. Druk op de pijl in het menu 'Gebruiker'.

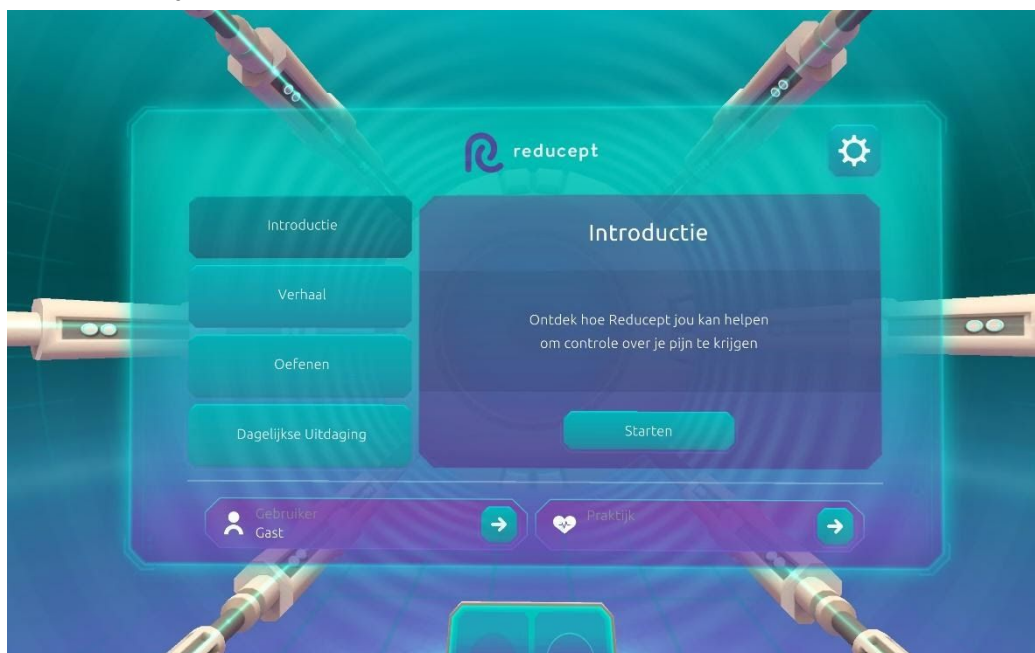

3. Voer je emailadres in en het wachtwoord dat je hebt ingesteld in het Reducept dashboard en druk daarna op de knop 'Inloggen'.




4. Je bent nu ingelogd.

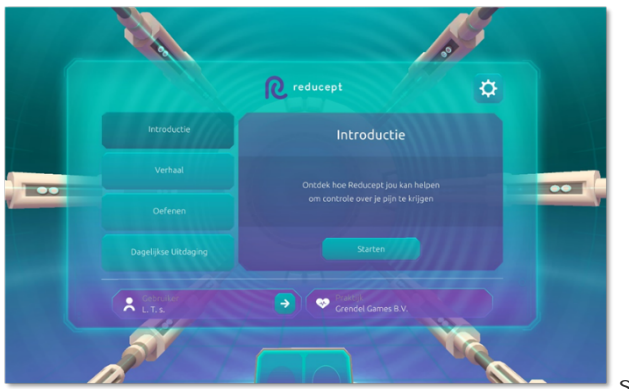

S

De Reducept game in VR spelen

1. Start de Reducept app (zie de stap 'Reducept installeren op je telefoon'). Zorg dat je bent ingelogd (zie de stap 'Inloggen in de Reducept app').
2. Open het 'Opties' scherm door op het tandwiel rechtsboven te drukken.

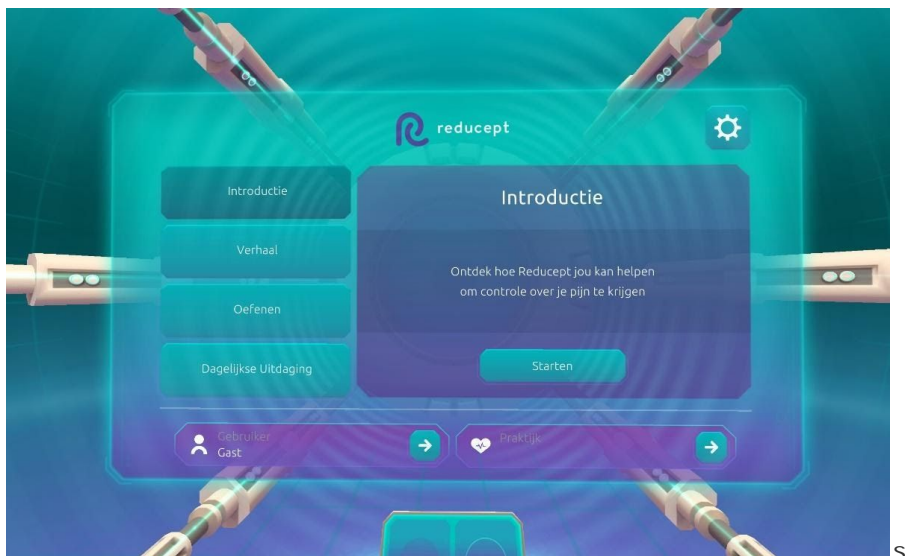

S

